



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474  
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209  
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

## **ELETTROSTICK DOPOPUNTURA INNOVATIVO, RIVOLUZIONARIO ED EFFICACE TRATTAMENTO DELLE IRRITAZIONI CAUSATE DA PUNTURE DI ZANZARE E DALIEVI URTICAZIONI DI MEDUSE E ORTICHE.**

**SANDOKAN ELETTROSTICK DOPOPUNTURA** è dotato di un generatore piezoelettrico a cristalli appositamente tarato per lenire il fastidio ed il gonfiore della puntura di zanzara. Non unge, non macchia, non ha pile, ecologico, non rilascia sostanze chimiche. Può essere riapplicato per esaltarne l'efficacia, non ha scadenza, ed ha un'autonomia di 25.000 impulsi, pari a circa 5.000 punture trattate. Pratico, ideale da portare sempre con noi.

### **COME FUNZIONA**

Il principio, già da tempo in uso in medicina, è quello dell'applicazione di brevi impulsi elettrici a voltaggio ed amperaggio determinato. Il funzionamento si basa sulla piezoelettricità, cioè sulla generazione di scariche elettriche attraverso processi di compressione e dilatazione meccanica sulla superficie di alcuni cristalli, come il quarzo.

Lo sfruttamento del meccanismo piezoelettrico, che elimina la necessità di pile o altre fonti di energia se non quella necessaria a premere il pulsante per generare l'impulso, ha permesso di realizzare un dispositivo di dimensioni contenute per poter essere tenuto sempre a portata di mano.

### **COME SI USA**

Applicare l'elettrostick sulla parte interessata, e premere il pulsante nero per ottenere il microimpulso. Applicare 4/5 impulsi sopra ed intorno alla puntura. Per riassorbire un eventuale gonfiore sono necessari 12/16 impulsi. Per avere i migliori risultati si raccomanda di utilizzare l'elettrostick il più presto possibile dopo la puntura.

L'elettrostick è adatto a tutti, adulti e bambini. Prima di usare su bambini sotto i 6 mesi di età, consultare il medico.

L'effetto benefico si avverte dopo qualche minuto.

### **AVVERTENZE:**

- Evitare l'uso in zone particolarmente sensibili (contorno occhi, bocca, mucose ecc.)
- Prudenzialmente, se ne sconsiglia l'uso a portatori di pacemakers ed ai soggetti cardiopatici.
- Evitare l'uso dopo l'applicazione di insetto-repellenti o comunque non usare in prossimità di sostanze infiammabili liquide o gassose.
- Disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'utilizzo su zone sanguinanti e nel caso di uso su più persone.
- Custodire il prodotto lontano dalla portata di bambini ed animali domestici

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tensione di scarica | 14 Kv          |
| Corrente di scarica | 0,7 mA         |
| Durata dell'impulso | 0,01 ms        |
| Peso                | 10 grammi      |
| Alimentazione       | piezoelettrica |
| Durata              | 25.000 impulsi |

5.000 punture c.a.

Il prodotto NON HA SCADENZA

E' un Dispositivo Medico Classe IIa 0051

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso

International Patents Pending

Società: EUROEQUIPE srl via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)

Telefono n°: (39) 051 734808

Fax n°: (39) 051 734474