

ELETTROSTICK DOPOPUNTURA SANDOKAN

COME FUNZIONA

Elettrostick Sandokan emette degli impulsi elettrici ad alta tensione (13Kv) che non devono preoccupare perché la corrente emessa è bassissima (0,7 mA) e la durata dell'impulso è brevissima (10 milionesimi di secondo). Di conseguenza l'energia in gioco è estremamente ridotta e quindi l'effetto sulla cute è assolutamente accettabile. Ma la tensione così elevata ha la proprietà di riuscire ad alterare la struttura molecolare degli enzimi che compongono l'anestetico e l'anticoagulante che la zanzara inocula, rendendoli atossici. Nel giro di pochi minuti il corpo non ha più bisogno di creare istamina e di conseguenza cessa il prurito. Elettrostick Sandokan è efficace su punture di zanzare e piccole urticazioni di medusa ed ortica. Non è efficace su punture di pappataci (flebotomi).

COME SI USA

Applicare l'elettrostick sulla parte interessata, e premere il pulsante nero per ottenere il microimpulso. Applicare 4/5 impulsi sopra ed intorno alla puntura. Per riassorbire un eventuale gonfiore sono necessari 12/16 impulsi.

Per avere i migliori risultati si raccomanda di utilizzare l'elettrostick il più presto possibile dopo la puntura.

L'elettrostick è adatto a tutti, adulti e bambini. Prima di usare su bambini sotto i 6 mesi di età, consultare il medico.

L'effetto benefico si avverte dopo qualche minuto.

AVVERTENZE:

- Evitare l'uso in zone particolarmente sensibili (contorno occhi, bocca, mucose ecc.)
- Prudenzialmente, se ne sconsiglia l'uso a portatori di pacemakers ed ai soggetti cardiopatici.
- Evitare l'uso dopo l'applicazione di insetto-repellenti o comunque non usare in prossimità di sostanze infiammabili liquide o gassose.
- Disinfettare regolarmente, soprattutto dopo l'utilizzo su zone sanguinanti e nel caso di uso su più persone.
- Custodire il prodotto lontano dalla portata di bambini ed animali domestici

Il prodotto NON HA SCADENZA